



ULTRA⁺

Plus Ultra

Отвъд ограниченията
на професионалното
избелване

BLANCONE[®]

Твоята избелваща система

2000

Стоматолозите и изследователи Пиергалини и Лупис започват проучвания на фото-химичните процеси

2010


Технологията BlancOne 1.0 Избелващи системи със скоростта на светлината е на пазара за първи път

ULTRA+

Ефективно избелване

Тестовите, проведени в DICCA laboratories в MEF на университета в Генуа, показаха изключителната ефективност на BlancOne® Ultra+ за подобряване на белотата на зъбните структури в сравнение с най-добрите в кабинетни системи за избелване.

Погобрение на белотата

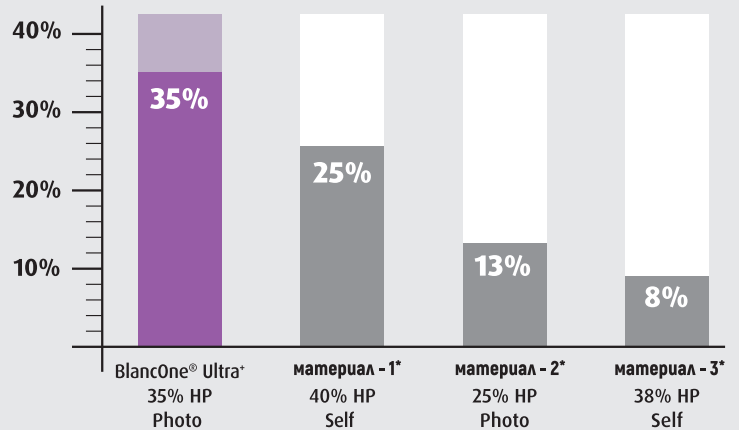**ULTRA+**

Време за контакт намалено повече от наполовина.

Тези резултати са постигнати с помощта на базовия протокол BlancOne® Ultra+:

- 3 цикъла от по 8 минути

За разлика от конкурентите имаме най-добра ефективност и комфорт на пациентите поради значително намаленото време за процедура.



BlancOne® Ultra+
(3x8=24 minutes)



материал - 1*
(3x20=60 minutes)



материал - 2*
(4x15=60 minutes)



материал - 3*
(4x8=32 minutes)

*Материали 1, 2 и 3 представляват световно известни избелващи системи.

Резултатите представляват изследване на белотата чрез спектрофотометричен метод на измерване на белота на зъбния емайл преди третиране и 48 часа след това.


ULTRA+

Без чувствителност на зъбите.

Новата формула на избелващия гел BlancOne® Ultra+ не включва „течната фаза“. Това минимизира възможността за проникване на пероксид в микродефектите на емайла, междузъбното пространство и под гингивалната бариера. Така рискът от чувствителност на зъбите и болезнени изгаряния на гингивалните тъкани е практически премахнат.

Ultra+ не съдържа никакви десенсибилизиращи агенти.

Проява на чувствителност

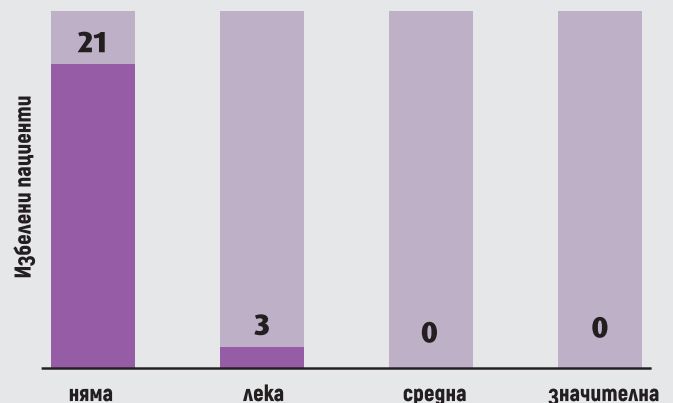

Киара Лоренци



„Много съм доволна от резултатите, получени благодарение на новия Ultra+. Наистина оценявам кремообразната текстура, която улеснява смесването и нанасянето. Гелът може лесно да се отстрани и изплакне. Отлична избелваща ефективност, която се оказа превъзходна“

2016



Технологията BlancOne 2.0
Първата постхигиенна
избелваща система

2022



Технологията BlancOne 3.0
Фото-химията отвежда
избелването отвъд
досегашните ограничения


ULTRA+

С грижа към зъбния емайл

толкова по-голям е рискът от застрашаване целостта на структурата на емайла.

BlancOne® Ultra+ , благодарение на по-ниската си концентрация и по-краткото време за контакт, произвежда само лека и временна промяна, запазвайки повърхността на емайла. Следователно с **Ultra+ няма нужда от реминерализиращи агенти.**

Тестовите, проведени в DICCA laboratories в MEF на университета в Генуа, показват, че колкото по-дълго е времето за контакт върху зъбната повърхност на пероксидни гелове с висок процент пероксид,

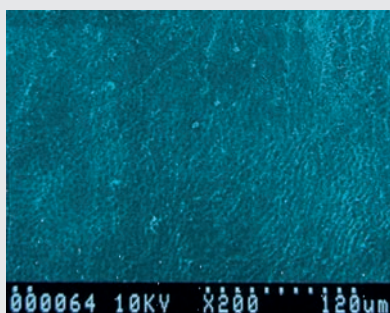

Непретиран зъбен емайл



Набраздяване на емайла след 60-минутно избелване с 40% хидроген пероксид

ULTRA+


Трайни резултати във времето

Благодарение на краткото време за прилагане, полученият резултат е 100% действително избелване, а не дехидратация.

Полученият бял нюанс е естествен, ярък и стабилен, като по този начин се избягва бърза регресия след рехидратиране на зъбния емайл.

Значителното освобождаване на кислородни атоми – форма на нерадикален кислород - в структурата на зъба гарантира продължително избелващо действие в рамките на следващите 72 часа, с по-нататъшно подобрение.

Стабилни резултати във времето

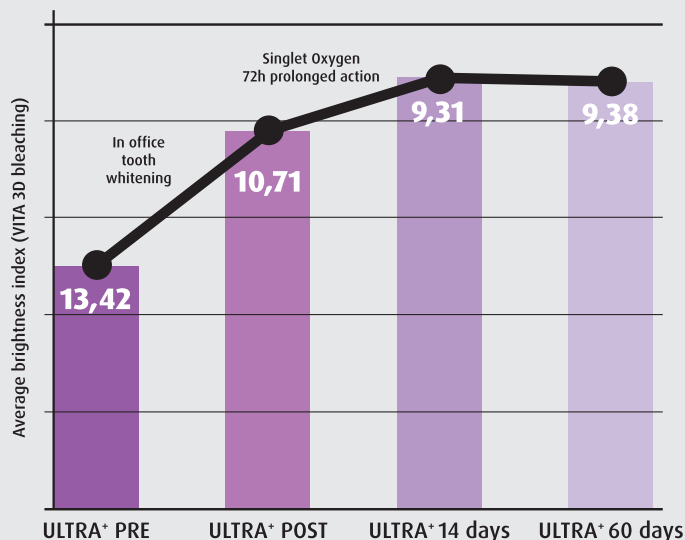

Валентино Натоли



„Открих, че продуктът е изключително лесен за боравене и използване, без никакви проблеми с чувствителност след процедурата. Отлични резултати и супер доволни пациенти.“



Ромина Росоли



„Крайната белота и трайният резултат са отлични, моите пациенти са много щастливи. Опаковката, включваща спринцовки за еднократна доза, е практична и удобна, когато например само „кучешките зъби“ трябва да бъдат подложени на избелващо лечение.“

BlancOne® ULTRA+ е най-доброто за Вас и Вашите пациенти

ULTRA

Смесване на гел-гел

Смесването и приготвянето на BlancOne® Ultra+ гел става чрез миксиране на двете спринцовки (фото бустер + избелващ гел) по лесен и бърз начин.

ULTRA

Кремообразна текстура

Кремообразната текстура позволява безпроблемно нанасяне на гела върху зъбната повърхност, здраво, без залепване или разтичане и с лесно отстраняване.

ULTRA

Еднодозова опаковка

BlancOne® Ultra+ се доставя в еднодозови опаковки, гарантиращи максимална ефективност на току-що смесения гел и максимална гъвкавост на употреба при избор на протокол според различните клинични нужди.

ULTRA

Съхранение без нужда от специално охлаждане

Благодарение на новата формула на избелващия гел, BlancOne® Ultra+ може да се съхранява в помещението без охлаждане до 24 месеца от датата на производство.

ULTRA

Един продукт - две решения

BlancOne® Ultra+ може да се използва както върху повърхността на зъба, така и в камерата на пулпата, като по този начин позволява кабинетни лечения, както на витални, така и на невитални зъби.



Стефано Чеки
Силвия Фасолио



„Нова версия на продукта, която допълнително подобрява различните възможности за лечение и превръща всяко избелващо лечение в уникално изживяване!“



Джузепе Липани



„Избелващият продукт се оказва изключително ефективен, много лесен за смесване, нанасяне и премахване. Не съм имал проблем с чувствителността, както по време на лечението, така и след него. Зъбите блестят от белота и не са дехидратирани. Отличната опаковка за еднократна доза го прави универсален и позволява избелването дори на един зъб или дъга без загуба на продукта“



Джулия Дзанконато



„Наистина вярвам в силата на усмивката, тъй като бях свидетелка на толкова много пациенти, чийто живот се подобри след използването на продуктите BlancOne. А днес това е още по-лесно благодарение на новия Ultra+“

Пациентите искат най-добрия резултат, траен във времето. Искат го сега. Добре, но с цената на какво!

ДОСЕГА това се постигаше чрез изключително агресивно медицинско избелващо лечение с познатите системи, което има много ОГРАНИЧЕНИЯ като:

- продължителни сеанси около и над 60 минути;
- болезненост на венци и устни по време и след процедурата;
- чувствителност на зъбите;
- тебеширен цвят, без гланц на зъбите, поради силна дехидратация на зъбния емайл;
- бавно възстановяване на зъбния емайл;
- проблеми при избелване на девитализирани зъби;
- сравнително краткотраен избелващ ефект;
- опасност от реална загуба на емайл при многократни избелвания;
- необходимост от продължителна „бяла диета“;
- специфично съхранение на избелващата система в хладилник.

**СЕГА има един продукт
преодолял максимално
познатите ограничения в
ПРОФЕСИОНАЛНОТО избелване.**



BLANCONE®

ULTRA+

PLUS ULTRA за разлика от "non plus ultra", означава:

*„Преминаването отвъд“, преодоляване на познатите ограничения
в професионалното избелване с Ultra+*

BLUEDENT 12 BL

ULTRA+

Избелваща система



ИЗБЕЛВАЩА ЛАМПА

REF 012003(9)



BlancOne® ULTRA+ Multi kit:

9x опаковки съдържащи:

- 1 x Избелващ гел 0,75 ml
- 1 x Фотоактиватор 0,25 ml

CARE

Акcesoари

REF 019002



BlancOne® гингивална бариера
с 3 канюли 1,2 ml



1 x Bluedent® дентален ретрактор
- МАЛЪК REF 601-201-S
1 x Bluedent® дентален ретрактор
- СРЕДЕН REF 601-202-M
1 x Bluedent® дентален ретрактор
- ГОЛЯМ REF 601-202-L

REF 601-100



30 x Bluedent® защитни маски
за долна част на лицето

BlancOne® ULTRA+ е CE медицинско изделие за лечение на оцветявания на зъбите, предназначено единствено за професионална употреба в кабинети от дентални лекари.

BlancOne® е търговска марка на IDS Spa.
Bluedent® е търговска марка на БГ ЛАЙТ ООД.

BLANCONE®



blancone.bulgaria

BlancOne Bulgaria

Производител на BlancOne системи за избелване
IDS Spa - Italy - www.blancone.eu

BG LIGHT LTD BULGARIA

Изключителен представител за България:

БГ ЛАЙТ ООД Пловдив

бул.В.Априлов 155

www.bglight.com

sales@bglight.com



032 644 089
0888 52 33 51

bglight.ltd

BG LIGHT LTD



Използвайте приложението
BlancOne PRO B (за Android и iOS)
за регистриране на пациенти и
сравняване на преди/след
снимки на избелването,
по-добра комуникация с
пациентите и още много екстри...

за Android



за iOS



<https://www.blancone.eu/en/pro/new-professional-app/>